

**АкваХим****продукт**

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com



# ТОТАЛДЕЗ (Дезинфекция)

## Концентрированное средство для холодной дезинфекции

### Назначение:

Средство «ТОТАЛДЕЗ» представляет собой концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом в виде прозрачной жидкости от голубого до зелено-голубого цвета, со слабым запахом спирта. Профессиональное чистящее и дезинфицирующее средство с ЧАС, спиртом и комплексонами: обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности помещений, оборудования, холодильника и морозильника, мусорных контейнеров, медицинских и стоматологических инструментов, инвентаря и т.д. Уничтожает микробы и бактерии, неприятный запах, мох и плесень. Средство экономичное (концентрация рабочих растворов 0,5% в режиме вирусных инфекций). Рекомендовано для использования в медицинских, детских, спортивных, общественных, торговых учреждениях, в организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, отдыха, парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических, микробиологических предприятиях, на предприятиях пищевой промышленности (молочной, мясной, рыбоперерабатывающей и т. д.), общественного питания, в быту и т.д. Обладает пролонгированным антимикробным действием в течении 3 часов.

### Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность, кг/м <sup>3</sup> ( 20°С)	800-1100
pH -100 % раствора( 20°С)	9,5-11,5
pH -1 % раствора( 20°С) в дистиллированной воде	7,5-8,5
Массовая доля изопропилового спирта, %	10,0
Массовая доля дидецилдиметиламмония хлорида, %	2,5
Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорид, %	10,0
Массовая доля триамин	5,0

### Микробиология:

Средство концентрированное. Средство «ТОТАЛДЕЗ» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая возбудителей туберкулёза, грибов родов Кандида и Трихофитон; особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), вирусов (в том числе возбудителей энтеровирусных инфекций (полиомиелита, Коксаки, ЕСНО), энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии (SARS), ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа H5N1 и др.; герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций). Средство сохраняет активность обеззараживающего действия при кратковременном замораживании и последующем оттаивании. Средство проявляет пролонгированное антимикробное (остаточное) действие в течении 3-х часов.

### Способ применения:

**Внимание! Перед использованием желательно взболтать!**

Применяется согласно инструкции № 01/13 от 2013г. по применению Дезинфицирующего средства «ТОТАЛДЕЗ».

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКОВОЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ.**

**Хранение:** от +5°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 60 месяцев в закрытой заводской таре, рабочих растворов-14 дней при условии их хранения в закрытой ёмкости, в тёмном прохладном месте. После кратковременного замораживания сохраняет свои свойства.

**Состав:** Спирт изопропиловый (10,0 масс. %) и ЧАС : (алкилдиметилбензиламмоний хлорид 20,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, триамин 5,0 %) в качестве действующих веществ, н-ПАВ < 5 %, функциональные добавки и вода.